

フェイスシールド ZERO

シールドとバンドの隙間があるので、通気性抜群！曇りにくい！！

アルコールや次亜塩素酸水での拭き取り消毒も可

シールドはクリアな視界を確保するPET樹脂（リサイクル原料を使用）

重さ39gと軽く、疲れにくい

made in 北海道



組立方


1 パットをバンドに貼ります。バンドに切り欠きに合わせてパットを貼り付けます。



バンドの中央になるように貼り付けます



2 バンドを輪にします。

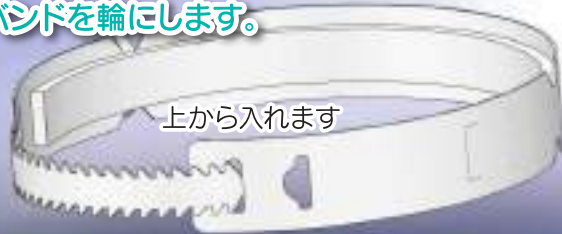


3 シールドを付けます。



シールドの爪をバンドにひっかけ固定します



4 頭にかぶった状態で、アジャスタをひっぱり調整します。

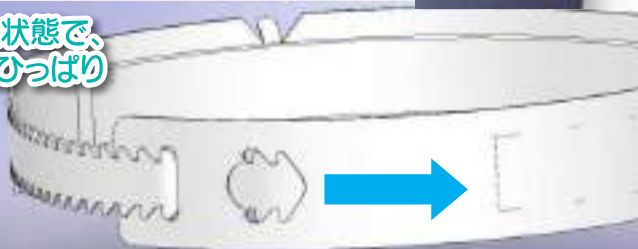

※シールドを拭くときは傷が付きまうので柔らかい布をご使用ください。
※シールドの交換のみも出来ます。

材質

●シールド/PET ●バンド/PP
●パット1/PE ●外装

第一ゴム

北海道小樽市奥沢3丁目28番12号
(本 社) TEL.0134-22-5161
(化成品部) TEL.0134-33-7700

<http://www.daiichi-gomu.co.jp/>
FAX.0134-25-4588